

DR. MARCOS MINELLO

# EQUIPAMENTO DE ELETRO POR 50 REAIS E MASSAGEADOR POR 200 REAIS

Eletroacupuntura Auricular e  
Massageador Mecânico



## Eletroacupuntura Auricular

Para começar a adaptação do equipamento, devemos procurar no Mercado Livre pelo equipamento que está na foto pelo nome **Tens Fisioterapia** (este equipamento custa, em média, 30 reais)

Equipamento  
de Eletro



## Eletroacupuntura Auricular

O primeiro passo quando seu equipamento chegar será desencapar a parte do fio que se conecta ao eletrodo (eletrodo este que vem no equipamento para ser aderido à pele do paciente)

**Equipamento  
de Eletro**



# Equipamento de Eletro

## Eletroacupuntura Auricular

A ponta desencapada do fio deve ter, no mínimo, 2 cm para enroscarmos o fio usando a ponta dos dedos para unir todos os filamentos de cobre e depois dobrar o fio ao meio por duas vezes, desta forma, o fio enrolado e dobrado ficará mais volumoso e com cerca de 0,5 cm. Quando for utilizar o equipamento, o terapeuta deverá enrolar um pequeno pedaço de algodão



# Equipamento de Eletro

## Eletroacupuntura Auricular

Quando for utilizar no paciente, o terapeuta deve embeber o algodão que está preso na ponta do fio com água ou com soro fisiológico, para que a corrente elétrica terapêutica possa passar para a orelha do paciente. Para fazer o estímulo de sedação, deve ser utilizado o modo *cupping* por 20 minutos e para tonificar, deve-se utilizar o modo *manipulation* por 10 minutos. Os algodões do eletrodo devem ser presos por um esparadrapo grande



# Massageador

## Mecânico

Com aproximadamente 200 reais, vamos aprender a montar uma ferramenta de movimento de grande velocidade regulável que se encontra no mercado por valores que variam de 4 mil a 2 mil reais




### 1º) TICO-TICO

Comprar uma serra tico-tico (recomendo da marca DEXTER, por ter velocidade regulável e encaixe rápido)



### 2º) SOLDA FRIA

Comprar uma massa de solda fria (a marca mais conhecida é a DUREPOXI, mas pode ser utilizada uma marca similar)

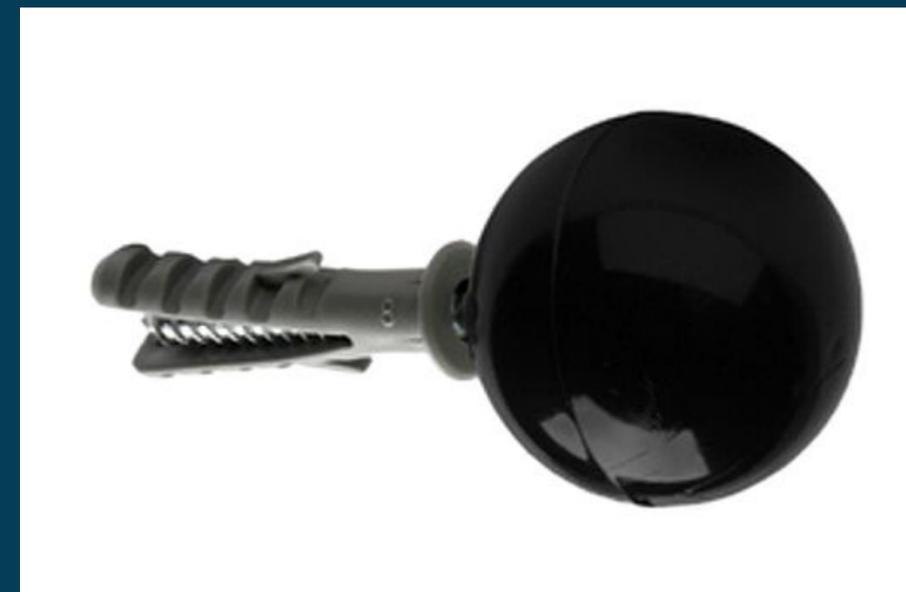

### 3º) BATEDOR DE PORTA

Comprar um batedor de porta

# MASSAGEADOR MECÂNICO

## MASSAGEADOR MECÂNICO

O primeiro passo após comprar todo o material é preparar a ponta do massageador. Neste momento, vamos juntar as duas partes do Durepoxi e preencher o orifício do batedor com o Durepoxi já pronto



**MASSAGEADOR  
MECÂNICO**

## MASSAGEADOR MECÂNICO

Em seguida, devemos introduzir a serra de corte até o final do orifício da bola do batedor de porta (deixe Durepoxi sobrando para ajudar a fixar melhor a bola na serra, como na imagem ao lado).



**MASSAGEADOR  
MECÂNICO**

## MASSAGEADOR MECÂNICO

Seu massager mecânico está pronto, basta utilizá-lo sobre as regiões onde tem tensões e pontos-gatilho. Me conta depois os resultados!

A man with a beard and mustache, wearing an orange t-shirt, is holding a blue mechanical massager. The massager has a black handle and a black roller head. The background is a dark teal color with a white diagonal line. The text 'MASSAGEADOR MECÂNICO' is overlaid in white on the bottom left.

MASSAGEADOR  
MECÂNICO

# Contatos

ASSISTA A AULA DESTE E-BOOK

[YOUTUBE.COM/C/MARCOSMINELLO](https://www.youtube.com/c/MarcosMinello)

FACEBOOK

[FACEBOOK.COM/DRMARCOSMINELLO](https://www.facebook.com/DRMARCOSMINELLO)

WHATSAPP

21 99506 2220

